



# Octo - La connessione Interna Ottagonale

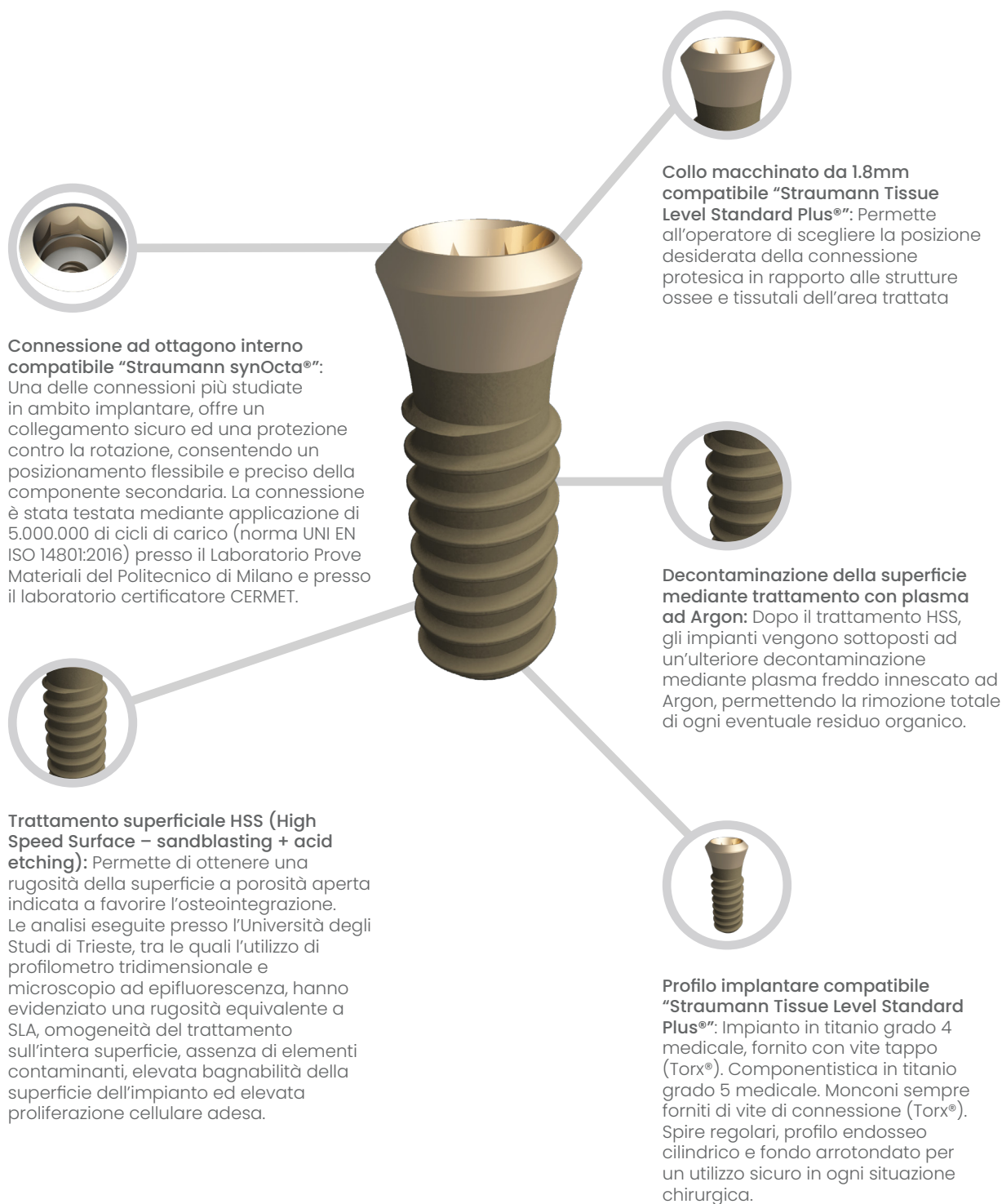

## Dimensioni

| REF         | Impianto (ØxL) | Connessione        |
|-------------|----------------|--------------------|
| GS IST 3308 | ● Ø3,3 x 8mm   | Ottagono<br>3,2 mm |
| GS IST 3310 | ● Ø3,3 x 10mm  |                    |
| GS IST 3312 | ● Ø3,3 x 12mm  |                    |
| GS IST 3314 | ● Ø3,3 x 14mm  |                    |
| GS IST 4108 | ● Ø4,1 x 8mm   |                    |
| GS IST 4110 | ● Ø4,1 x 10mm  |                    |
| GS IST 4112 | ● Ø4,1 x 12mm  |                    |
| GS IST 4114 | ● Ø4,1 x 14mm  |                    |
| GS IST 4808 | ● Ø4,8 x 8mm   |                    |
| GS IST 4810 | ● Ø4,8 x 10mm  |                    |
| GS IST 4812 | ● Ø4,8 x 12mm  |                    |
| GS IST 4814 | ● Ø4,8 x 14mm  |                    |

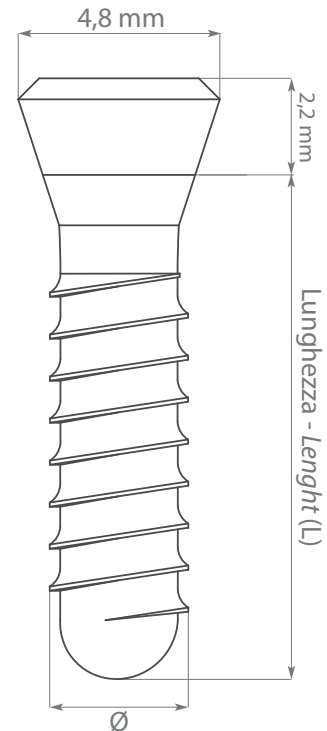

## Protocollo di osteomia

| Fresa                | Lancia Cilindrica Ø2.2 | Cilindrica Ø2.8 | Preparatore di spalla Ø2.8 | Cilindrica Ø3.5 | Preparatore di spalla Ø3.5 | Cilindrica Ø4.2 | Preparatore di spalla Ø4.2 |
|----------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|
| Velocità fresa (rpm) | 300                    | 300             | 300                        | 300             | 300                        | 300             | 300                        |
| 3.3                  | Collo affossato        | ●               | ●                          | ▼               |                            |                 |                            |
|                      | Collo Intramucoso      | ○               | ○                          | ▽               |                            |                 |                            |
| 4.1                  | Collo affossato        | ●               | ●                          | ●               | ▼                          |                 |                            |
|                      | Collo Intramucoso      | ○               | ○                          | ○               | ▽                          |                 |                            |
| 4.8                  | Collo affossato        | ●               | ●                          | ●               |                            | ●               | ▼                          |
|                      | Collo Intramucoso      | ○               | ○                          | ○               |                            | ○               |                            |

- Preparazione osteomia lunghezza nominale dell'impianto
- Preparazione osteomia lunghezza nominale dell'impianto + 1.8 mm
- ▼ Preparatore di spalla usato a tutta lunghezza
- ▽ Preparatore di spalla usato fino a marcatura

N.B. Tutte le misure sono in mm

N.B. La procedura raccomandata nel protocollo non dovrebbe sostituire il giudizio del dentista/chirurgo